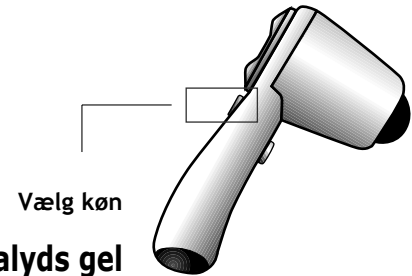
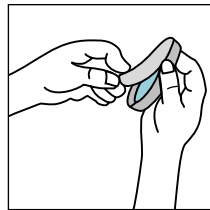


QUICK REFERENCE FOR BLADDER VOLUME (BVI 6100 & BVM 6500)


Note: Tryk på en af knapperne for at tænde for scanneren, når den er i dvale.

1 Vælg køn


(Kvinde symbolet vælges kun ved scanning af kvinder som ikke har fået foretaget en hysterectomi.)
Intet symbol for mænd.

**2 Placer en Sontac® Gel Pad eller brug ultralyds gel**

Åben gel pakken.

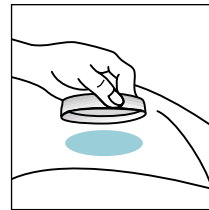


Placer en gel pad på
abdomen af patienten
ca. 3 fingerbredder over
symphysis pubis

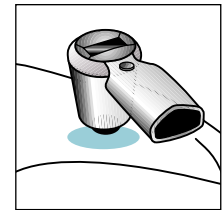

Placer scanhovedet
på gel pad

3 Sigt mod blæren

Placer scanhovedet så det peger
ned mod patientens coccyx
(haleben)

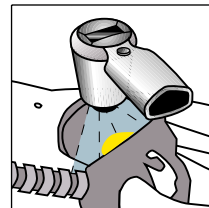


Sigt mod blæren


4 Tryk på Scan knappen**5 Check korrekt placering****5A Blinkende pil = scan igen**

Blinkene pil

Eksempel:

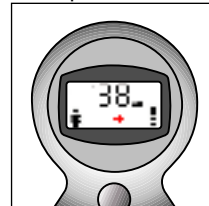


1) Pil peger mod venstre

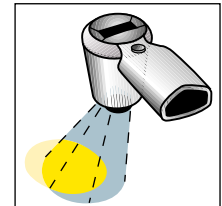

2) sigt mod venstre, scan da igen

5B Fast pil eller ingen pil = godkendt scanning

Fast pil eller ingen pil

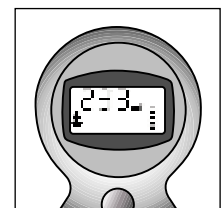

BVI 6100




BVM 6500

DIAGNOSTIC
ULTRASOUND

QUICK REFERENCE FOR BLADDER VOLUME (BVI 6100 & BVM 6500)

Note: Tryk på en af knapperne for at tænde for scanneren, når den er i dvale.

- 1** Ved scanning af kvinder trykkes på knappen under skærmen til der vises et **kvinde ikon**, Kvinder der har fået foretaget hysterectomi skal scannes som mænd. Tryk på knappen under skærmen så der ikke er noget kvinde ikon. Ved alle andre patienter, trykkes køn vælger knappen til der ikke vises et ikon
- 2** Find midtlinien ca. 3 fingerbredder over symphysis pubis og læg en Sontac Gel Pad eller påfør Ultralyds Gel.
- 3** Placer Scanhovedet, den runde sorte del af scanneren, mod den forventede blæreposition. Hos de fleste patienter betyder det en svag hældning mod patientens haleben.
- 4** Tryk og slip **scanknappen**, placeret under scanhovedet. Mens der scannes vil der være et scannings ikon  i skærmens øverste højre hjørne.

Hold scanneren stille så længe dette ikon vises. Når der høres et beep er scanningen færdig.
- 5** Kontroller at blæren er i centrum ved scanning; fast pil eller ingen pil = godkendt scanning.
- 5A** Hvis der fremkommer blinkende pile under blærevolumen er det nødvendigt at vinkle scanhovedet i retning af den blinkende pil. Hvis den blinkende pil peger mod venstre, vinkles scanhovedet så det kan scanne mere mod venstre. Tryk på scanknappen igen. Gentag indtil der vises en fast pil eller slet ingen pil.
- 5B** Den målte blærevolume er præcis når der enten vises en fast eller ingen pil under blærevolumen. Noter patientens blærevolume. Scanneren gemmer ikke blæremålingerne.



BVI 6100



BVM 6500

www.dxu.com

For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348

www.meq.dk

DIAGNOSTIC
ULTRASOUND

DU Corporate Headquarters: 21222 30th Dr SE, Ste 120, Bothell, WA 98021, USA
European Office: Lage Dijk-Noord 14, 3401 VA, IJsselstein, The Netherlands

