


## KORT BRUKSANVISNING FÖR BLÅSVOLYM (BVI 6100 & BVM 6500)


OBS ! Om apparaten är avstängd, slå på den genom att trycka på valfri knapp och invänta signalen.

### 1 Ange kön


Välj kvinna **ENDAST** för kvinnor som har livmodern kvar

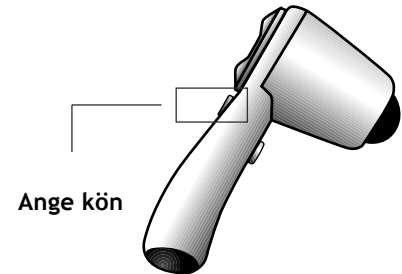


### 2 Anbringa en Sontac® gelplatta

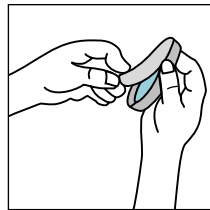

Öppna förpackningen med gelplattan

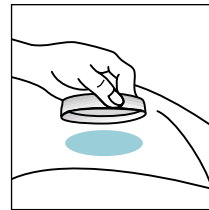


Placera gelplattan på patientens buk, 3 cm ovanför symfysen

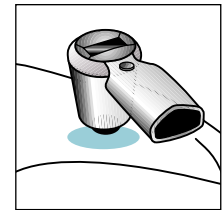

Placera tonhuvudet på gelplattan

### 3 Rikta mot blåsan

Rikta tonhuvudet snett ner mot patientens svanskota

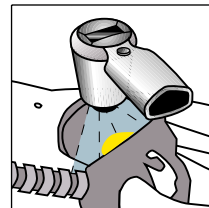

Rikta mot blåsan

### 4 Tryck på SCAN knappen


### 5 Kontrollera riktningen

### 5A Blinkande pilar = Rikta om




Blinkande pil visas

Exempel:

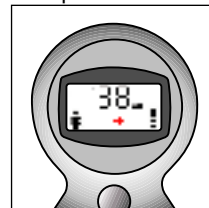

1) Pil pekar mot vänster

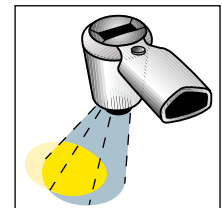


2) Rikta mot vänster och scanna igen

### 5B Fasta pilar eller inga pilar = scanningen godkänd Ej nödvändigt rikta om



Fast pil eller ingen pil

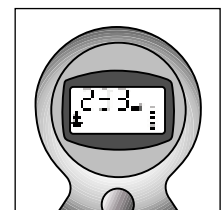

BVI 6100



BVM 6500


## KORT BRUKSANVISNING FÖR BLÅSVOLYM (BVI 6100 & BVM 6500)

**OBS !** Om apparaten är avstängd, slå på den genom att trycka på och släppa valfri knapp och invänta signalen.

**1** För att välja kvinna eller avlägsna alternativet kvinna tryck på knappen belägen nedanför LCD fönstret. När man har valt programmet för kvinna visas en kvinno-symbol i LCD fönstret. Använd detta val endast när en kvinna som inte genomgått en hysterektomi ska undersökas. Tryck på den angivna knappen tills ingen kvinno-symbol är synlig när det gäller alla övriga patienter.

**2** Palpera symfyssen (blygdbenet). Anbringa en Sontac® ultraljudsgelplatta i medellinjen ett par cm ovanför symfyssen

**3** Placera tonhuvudet (den rundade domen på apparaten) på Sontac gelplattan och sikta mot blåsans plats. På de flesta patienter innebär detta att man siktar snett ner mot svanskotan.

**4** Tryck och släpp **SCAN knappen**, belägen på undersidan av apparatens handtag. En scanning symbol visas  i övre högra hörnet av LCD fönstret under pågående scanning.

Håll apparaten stadigt tills scanningen är klar. Det hörs ett pip när scanningen är klar, och blåsvolymen presenteras på LCD skärmen.

**5** Kontrollera att apparaten hade rätt riktning inställd genom att se på **pilarna**.

**5A** Om det visas blinkande pilar på LCD skärmen under angiven volymsiffror, måste undersökningen göras om; sikta då mot det håll som pilarna visar. Om pilarna är riktade mot vänster, så rikta apparaten så att ultraljudsvågorna projiceras längre åt vänster. Gör sedan om scanningen. Upprepa, om nödvändigt, tills en fast pil eller ingen blinkande pil visas på LCD skärmen.

**5B** Den presenterade blåsvolymen är korrekt när ingen pil eller enbart en fast pil visas på LCD skärmen efter genomförd scanning. Skriv upp patientens blåsvolym. Apparaten sparar inte mätningen efter att en ny scanning har påbörjats.



BVI 6100



BVM 6500

[www.dxu.com](http://www.dxu.com)

For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348

DU Corporate Headquarters: 21222 30th Dr SE, Ste 120, Bothell, WA 98021, USA  
European Office: Lage Dijk-Noord 14, 3401 VA, IJsselstein, The Netherlands