

QUICK REFERENCE FOR PEDIATRIC BLADDER VOLUME


BladderScan™

Note: Tryk på en af knapperne for at tænde for scanneren, når den er i dvale.


1 Vælg køn

Kvinde ikonet skal kun vises ved scanning af kvinder


Vælg køn

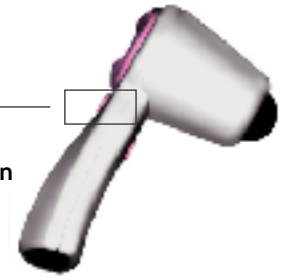


2 Placer en Sontac® Gel Pad eller brug ultralyds gel

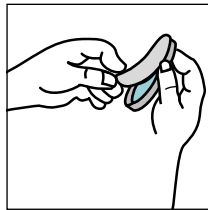

Åben gel pakken.

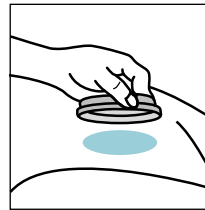


Placer en gel pad på
abdomen af patienten
ca. 3 fingerbredder over
symphysis pubis

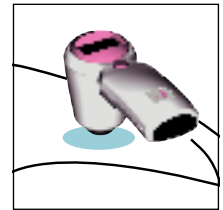

Placer scanhovedet
på gel pad

3 Sigt mod blæren

Placer scanhovedet så det peger
ned mod patientens coccyx
(haleben)

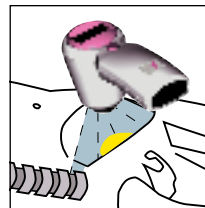

Sigt mod blæren

4 Tryk på Scan knappen

Scan knap



5 Check korrekt placering

5A Blinkende pil = scan igen




Blinkene pil

Eksempel:




1) Pil peger mod venstre

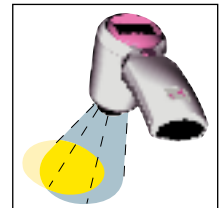

2) sigt mod venstre, scan da igen

5B Fast pil eller ingen pil = godkendt scanning

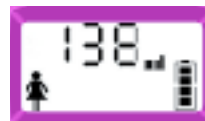

Fast pil eller ingen pil



BVI 6200

DIAGNOSTIC
ULTRASOUND

www.dxu.com


For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348

www.meq.dk

0900-0681-01-60 Danish

Pædiatri scanneren er designet til at måle en blærevolume mellem 0 og 200ml

Note: Tryk på en af knapperne for at tænde for scanneren, når den er i dvale.

- 1** Tryk på køn vælger knappen for skifte mellem scanning af mand eller kvinde. Kvinde ikonet viser at scanneren er klar til at måle på en kvinde. Kvinde ikonet skal kun vælges ved scanning af kvinder.
- 2** Find midtlinien ca. 3 fingerbredder over symphysis pubis og læg en Sontac Gel Pad eller påfør Ultralyds Gel.
- 3** Placer Scanhovedet, den runde sorte del af scanneren, mod den forventede blæreposition. Hos de fleste patienter betyder det en svag hældning mod patientens haleben.
- 4** Tryk og slip **scanknappen**, placeret under scanhovedet. Mens der scannes vil der være et scannings ikon  i skærmens øverste højre hjørne.

Hold scanneren stille så længe dette ikon vises. Når der høres et beep er scanningen færdig.

- 5** Kontroller at blæren er i centrum ved scanning; fast pil eller ingen pil = godkendt scanning.
- 5A** Hvis der fremkommer blinkende pile under blærevolumen er det nødvendigt at vinkle scanhovedet i retning af den blinkende pil. Hvis den blinkende pil peger mod venstre, vinkles scanhovedet så det kan scanne mere mod venstre. Tryk på scanknappen igen. Gentag indtil der vises en fast pil eller slet ingen pil.

- 5B** Den målte blærevolume er præcis når der enten vises en fast eller ingen pil under blærevolumen. Noter patientens blærevolume. Scanneren gemmer ikke blæremålingerne.



BVI 6200

DIAGNOSTIC
ULTRASOUND

www.dxu.com

For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348

DU Corporate Headquarters: 21222 30th Dr SE, Ste 120, Bothell, WA 98021, USA
European Office: Lage Dijk-Noord 14, 3401 VA, IJsselstein, The Netherlands

www.meq.dk

