


Guide d'utilisation pour mesure du volume vésical pédiatrique **BladderScan™**

Note: Pour remettre en marche l'appareil en veille, presser et relâcher n'importe lequel des boutons et attendre le signal sonore.


1 Sélectionner le genre

Sélectionner l'option « féminin » SEULEMENT pour les patients femmes


Sélectionner le genre

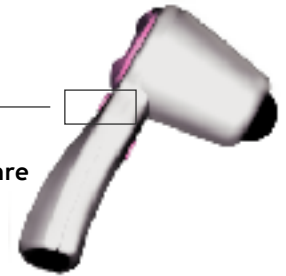


2 Appliquer un timbre gel Sontac®

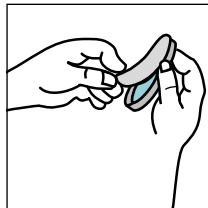

Ouvrir l'emballage du timbre gel

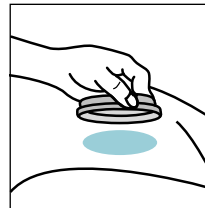


Placer le timbre gel sur l'abdomen environ 3 cm au dessus de la symphyse pubienne

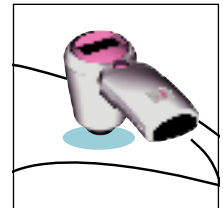

Placer l'appareil sur le timbre gel

3 Viser la vessie

(Incliner l'appareil en direction du coccyx)

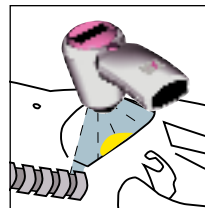

Viser la vessie

4 Presser le bouton de mesure

bouton de mesure



5 Vérifier le centrage

Flèches clignotantes = modifier la position de l'appareil


Par Exemple:



Flèches clignotantes



1) La flèche indique la gauche

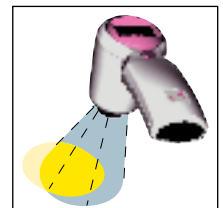

2) incliner l'appareil vers la gauche et mesurer à nouveau.

5B Flèches fixes ou absentes = accepter la mesure



Flèches fixes ou absentes



BVI 6200

DIAGNOSTIC
ULTRASOUND


Le BladderScan Pédiatrie a été prévu pour mesurer les volumes entre 0 et 200 ml.

Note: Pour remettre en marche l'appareil en veille, presser et relâcher n'importe lequel des boutons et attendre le signal sonore.

1 Presser le bouton « genre », placé sous l'écran LCD, pour sélectionner ou désélectionner l'option « féminin ». Quand l'option « féminin » est sélectionnée, une icône symbolisant une femme apparaît à l'écran. N'utiliser l'option « féminin » que pour les patients femmes.

2 Repérer la symphyse pubienne. Placer un timbre gel Sontac® centré sur l'abdomen, à environ 3 cm au dessus de la symphyse pubienne.

3 Positionner la tête de mesure (le dôme noir de l'appareil) sur le timbre gel Sontac®, en direction de l'emplacement estimé de la vessie. En général, une légère inclinaison de l'appareil en direction du coccyx est nécessaire.

4 Appuyer et relâcher **le bouton de mesure**, situé sous la poignée de l'appareil. Un symbole de mesure  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD pendant le temps de la mesure.

Tenir fermement l'appareil sans bouger jusqu'à la fin de la mesure.
Un bip signale la fin de la mesure et le volume mesuré s'affiche à l'écran.

5 Contrôler le bon angle de visée grâce aux flèches clignotantes à l'écran.

5A Si une flèche clignotante s'affiche à l'écran sous le volume mesuré, il est nécessaire de réajuster l'orientation de l'appareil dans la direction indiquée par la flèche. Imaginer le faisceau d'ultrasons sortant de l'appareil en direction du corps du patient. Si la flèche clignotante indique la gauche, orienter l'appareil pour que les ultrasons soient émis plus vers la gauche. Mesurer à nouveau. Répéter l'opération jusqu'à ce que la flèche ne clignote plus ou disparaisse.

5B Le volume vésical affiché est fiable lorsque la flèche ne clignote plus ou disparaît. Noter le volume vésical mesuré, l'appareil effaçant cette valeur de la mémoire dès la prochaine mesure. Il est recommandé de reproduire trois fois la mesure de valeurs proches pour confirmer la justesse de la mesure.



BVI 6200