


Nota : per accendere il sistema di scansione, quando esso è nella modalità "sleep", premere e rilasciare qualunque tasto ed aspettare il cicalino.

1


Selezionare il sesso

selezionare l'opzione "Femminile" solo per pazienti donna

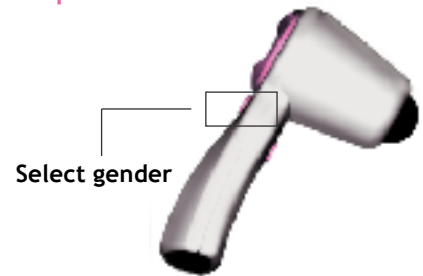


2


Applicare Sontac® Gel Pad

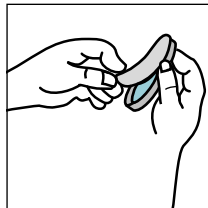

aprire la confezione di gel

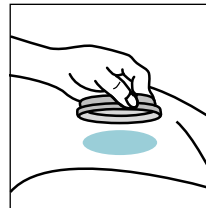

Porre il gel pad sull'addome del paziente 2,5 cm ca. sopra la sinfisi pubica

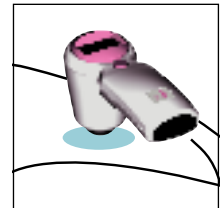


Porre la testina sul gel pad

3

Puntare alla vescica

Puntare la testina leggermente verso il basso in direzione del coccige (osso sacro)

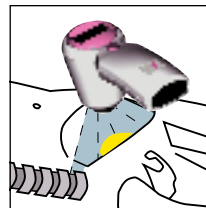

Puntare alla vescica

4

Premere il tasto scansione

Tasto scansione



5

Verificare il puntamento

5A

Frecce lampeggianti= Ri-Puntare




Frecce lampeggianti

Esempio:




1) la freccia indica sinistra

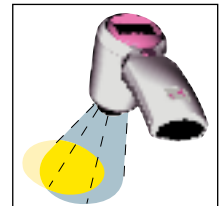

2) puntare a sx e riscannerizzare

5B

**Frecce fisse o nessuna freccia= Accettare la scansione
Non necessario ri-puntare**

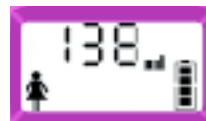

Frecce fisse o nessuna freccia



BVI 6200

IL BLADDER SCAN PEDIATRICO E' PROGETTATO PER RILEVARE VOLUMI VESCICALI TRA 0 E 200 ML

Nota: per accendere il sistema di scansione, quando esso è nella modalità "sleep", premere e rilasciare qualunque tasto ed aspettare il cicalino.

- 1 Premere il **tasto genere**, posizionato sotto lo schermo LCD, per selezionare o annullare l'opzione "Femminile"; quando tale opzione è selezionata, una **icona "Femminile"** si visualizza sullo schermo LCD. Usare questa opzione solamente quando si effettua la scansione su una paziente femmina.
- 2 Palpare la sinfisi pubica del paziente. Posizionare un Sontac® ultrasound gel pad sulla linea mediana dell'addome, ca. 2,5 cm sopra la sinfisi pubica.
- 3 Posizionare la testina (parte tonda a cupola dell'unità) sul Sontac gel pad, punta puntata nella presunta direzione della vescica. Per la maggioranza dei pazienti, ciò significa puntare leggermente in basso in direzione del coccige.
- 4 Premere e rilasciare il **Tasto Scansione**, posto nella parte inferiore dell'impugnatura dello strumento. Appare un simbolo  di scansione all'angolo sup. dx del display durante la scansione.

Mantenere ben ferma l'unità fino a fine scansione. Quando sentirete un beep, la scansione è completata e la misurazione del volume vescicale viene mostrata sul display.
- 5 Verificare che l'unità fosse correttamente puntata tramite le **Frecce di puntamento** lampeggianti.
- 5A Se appaiono frecce lampeggianti sul display, al di sotto della misura del volume vescicale, dovete ripuntare in direzione della freccia lampeggiante. Visualizzate le onde ultrasoniche che escono dalla testina attraverso il corpo del paziente. Se la freccia lampeggiante punta a sinistra puntate l'unità in modo tale che le onde ultrasoniche siano proiettate più a sinistra. Quindi, ri-scansionate il paziente. Ripetere tante volte quanto necessario, finché appaia una freccia fissa o non appaia alcuna freccia sul display.
- 5B Il volume vescicale misurato è accurato solo quando non appaia alcuna freccia di puntamento o solo frecce fisse dopo la scansione sul display. Annotate il volume vescicale del paziente. L'unità non salverà la misurazione dopo che avrete iniziato una nuova scansione.



BVI 6200