

## QUICK REFERENCE FOR PEDIATRIC BLADDER VOLUME

BladderScan™

OBS ! Om apparaten är avstängd, slå på den genom att trycka på valfri knapp och invänta signalen.

1

### Ange kön


Ange kvinna ENDAST för flickor

Ange kön




2


### Anbringa en Sontac® gelplatta

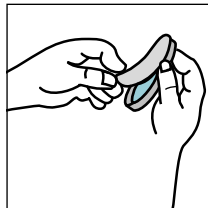

Öppna förpackningen med gelplattan

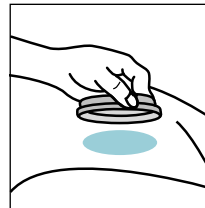

Placera gelplattan på patientens buk, 3 cm ovanför symfyssen

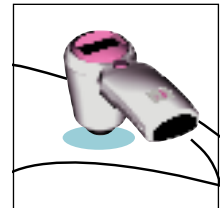


Placera tonhuvudet på gelplattan

3

### Rikta mot blåsan

Rikta tonhuvudet snett ner mot patientens svanskota

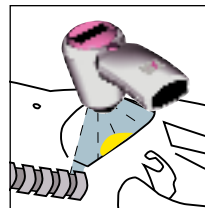

Rikta mot blåsan

4

### Tryck på SCAN knappen

5

### Kontrollera riktningen

5A

### Blinkande pilar = Rikta om




Blinkande pil visas

Exempel:




1) Pil pekar mot vänster

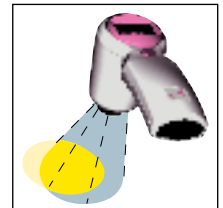

2) Rikta mot vänster och scanna igen

5B

### Fasta pilar eller inga pilar = scanningen godkänd Ej nödvändigt rikta om

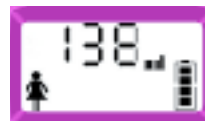

Fast pil eller ingen pil



BVI 6200

DIAGNOSTIC  
ULTRASOUND

www.dxu.com


For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348

0900-0681-01-60

## KORT BRUKSANVISNING FÖR PEDIATRISK BLÅSVOLYM BladderScan™

BladderScan för pediatriskt bruk är gjord för att mäta blåsvolymer mellan 0 och 200 ml.

**OBS !** Om apparaten är avstängd, slå på den genom att trycka på och släppa valfri knapp och invänta signalen.

- 1** För att välja kvinna eller avlägsna alternativet kvinna tryck på **knappen för att ange kön** belägen nedanför LCD fönstret. När alternativet kvinna har valts, visas en **kvinnosymbol** i LCD fönstret. Använd detta alternativ endast vid scanning av flickor.
- 2** Palpera symfyssen (blygdbenet). Anbringa en Sontac® ultraljudsgelplatta i medellinjen ett par cm ovanför symfyssen.
- 3** Placera tonhuvudet (den rundade domen på apparaten) på Sontac gelplattan och sikta mot blåsans plats. På de flesta patienter innebär detta att man siktar snett ner mot svanskotan.
- 4** Tryck och släpp **SCAN knappen**, belägen på undersidan av apparatens handtag. En scanning symbol visas  i övre högra hörnet av LCD fönstret under pågående scanning. the LCD screen during the scan.  
  
Håll apparaten stadigt tills scanningen är klar. Det hörs ett pip när scanningen är klar, och blåsvolymen presenteras på LCD skärmen.
- 5** □Kontrollera att apparaten hade rätt riktning inställd genom att se på **pilarna**.
- 5A** Om det visas blinkande pilar på LCD skärmen under angiven volymsiffra, måste undersökningen göras om; sikta då mot det håll som pilarna visar. Om pilarna är riktade mot vänster, så rikta apparaten så att ultraljudsvågorna projiceras längre åt vänster. Gör sedan om scanningen. Upprepa, om nödvändigt, tills en fast pil eller ingen blinkande pil visas på LCD skärmen.
- 5B** Den presenterade blåsvolymen är korrekt när ingen pil eller enbart en fast pil visas på LCD skärmen efter genomförd scanning. Skriv upp patientens blåsvolym. Apparaten sparar inte mätningen efter att en ny scanning har påbörjats.



BVI 6200

DIAGNOSTIC  
ULTRASOUND

[www.dxu.com](http://www.dxu.com)

For more information, call 800.331.2313 (in the U.S. and Canada) or 425.867.1348

DU Corporate Headquarters: 21222 30th Dr SE, Ste 120, Bothell, WA 98021, USA  
European Office: Lage Dijk-Noord 14, 3401 VA, IJsselstein, The Netherlands

